

Einzelprobe

Mundhöhlenabstrich (Speichelprobe):
Führen Sie den Abstrich mit dem grösseren der beiden Tupfer durch, indem Sie ihn an folgenden Stellen leicht drehen:



Zahnfleisch unter der Oberlippe



Zahnfleisch unter der Unterlippe



Wange beide Seiten



Unter der Zunge



Auf der Zunge




Harter und weicher Gaumen

4


Tupfer im Transportmedium gut ausschwenken, ausdrücken und entfernen.

Nicht abbrechen oder abschneiden, der Tupfer darf nicht im Röhrchen mit Transportmedium verbleiben!

► Tupfer mit infektiösem Abfall entsorgen

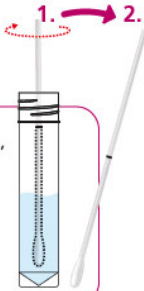

5

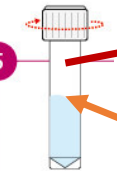

Röhrchen gut hülse geben u Labor schicken

Beschriftung*



Der Sack ist mit dem gleichen Barcode beschriftet wie der Pool.

Der Sack enthält:

- Poolprobe
- Alle Einzelproben von denen, die in diesem Pool zusammengefasst sind

*Die Beschriftung bei den Proben ist zwingend

Senkrecht

Poolprobe

